

C KI KI CONDUIT®

Borne éthylotest

La borne C KI KI CONDUIT® permet d'évaluer son taux d'alcoolémie avant de reprendre le volant ou son travail.

Placée à la sortie d'une discothèque ou d'une cantine d'entreprise, elle permet à chacun de vérifier de façon fiable son taux d'alcool, en quelques secondes.

Son monnayeur programmable vous permet d'offrir ce service ou de le refacturer !



APPLICATIONS

Cette borne a été spécialement conçue pour que les personnes fréquentant les lieux suivants puissent effectuer un auto-dépistage de leur taux d'alcoolémie avant de reprendre le volant ou leur travail :

- débit de boissons (discothèques, bars, cabarets, casinos, ...),
- les salles communales ou salles des fêtes
- les restaurants y compris les cantines d'entreprise
- les événements festifs organisés en entreprise
- parkings publics
- centres de location de véhicules, ...

RAPPELS REGLEMENTAIRES

Dans tous les débits de boisson ouverts de 2h à 7h, une mise à disposition de dispositifs certifiés pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique est obligatoire depuis le 01 décembre 2011, conformément à l'arrêté du 24 août 2011. Pour tous les employeurs, l'obligation de sécurité, consistant à évaluer les risques, à les retranscrire dans le document unique et à les prévenir est prévue dans le Code du travail (Art. L. 4121-1). A cette obligation de sécurité s'ajoute le respect de la législation de l'alcool, qui se traduit par une modification du règlement intérieur afin de :

- limiter l'introduction des boissons alcoolisées dans l'entreprise (Art R 4228-20 et 21)
- interdire l'entrée et la présence de personnes en état d'ébriété sur le lieu de travail (Art. L 232-2)

POURQUOI CHOISIR LA BORNE C KI KI CONDUIT ?

- C'est un moyen simple et fiable pour connaître son taux d'alcoolémie. Faites confiance au fabricant des véritables Alcotest®. Dräger fut le pionnier dans le diagnostic du taux d'alcoolémie en 1953 en créant le premier Alcotest®, une marque déposée.
- Choisissez le même fournisseur que les forces de l'ordre. Dräger les équipe en France et dans le monde.
- Son monnayeur vous permet soit d'offrir soit de faire payer le dépistage à l'aide de pièces de 0,1 à 1 €.
- Borne soumise au régime de la TVA et amortissable au bilan
- Ses grandes dimensions la rendent parfaitement repérable et empêche tout vol. Elle est visible même dans le noir, grâce à son caisson rétro-éclairé.
- Hygiène totale : 1 embout permet de faire 1 test. Ces embouts sont à usage unique et homologués par le ministère de la Santé.
- Utilisable de manière intensive : 1 test toutes les 10 secondes.
- Confidentialité du résultat : seul le testeur voit apparaître le résultat
- Borne référencée par l'association Entreprise et Prévention, association regroupant des entreprises du secteur des boissons alcoolisées en France afin de lutter contre la consommation excessive ou inappropriée de boissons alcoolisées (Bacardi-Martini, Brasserie Kronenbourg, Moët Hennessy Diageo, ...)
- Garantie 2 ans



Assurez-vous que vos salariés ou clients soient en état de reprendre le volant ou de travailler !

COMMENT FONCTIONNE LA BORNE C KI KI CONDUIT ?

- placer un embout buccal sur la borne
- introduire un jeton ou une pièce dans la fente
- soufflez à travers l'embout buccal
- le résultat s'affiche : le voyant rouge s'illumine et le message P comme positif s'affiche : le taux d'alcoolémie du testeur est égal ou supérieur à la limite autorisée.

Si en revanche une valeur s'affiche sans que le voyant ne s'éclaire, cela signifie que votre taux d'alcoolémie est inférieur au seuil légal. Le testeur peut prendre le volant en toute sécurité !

Le taux limite autorisée en France est de 0.25 mg/ l d'air expiré pour tous sauf pour les conducteurs d'autocars où ce seuil est de 0.1 mg/l d'air expiré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Borne électronique à affichage digital du taux d'alcoolémie en mg/ l d'air expiré

Principe de mesure : capteur électrochimique

Conforme à la NF X 20 703 de classe 1 et au marquage NF 227

Echelle de mesure : 0.00 à 1.44 mg/ l. Seuils réglables à max. 0.25 mg/ L

Conditions d'échantillonnage (mesure automatique) : à la fin de l'échantillon d'air expiré.

Débit expiré : > 18l/ min. Volume d'air expiré : >1.2 L

Précision de mesure : déviation standard avec solution d'éthanol LNE

0 à 0.35 mg/ l ± 0.02 mg/l ou ± 5% de la valeur de la mesure

Bridage de la mesure à la valeur légale pour éviter les concours entre les testeurs

Temps du test : 10 s seulement par utilisateur

Seuil réglable en fonction des accords d'entreprise en vigueur ou la valeur contraventionnelle requise (0.10 mg/ l pour les autocars, 0.25 mg/ l pour les autres véhicules)

Caisson lumineux rétro-éclairé

Monnayeur programmable sans comptage : option jeton ou pièce de monnaie : 0.10€/ 0.20€/ 0.50€/ 1€

Alimentation 220V

Dimensions : H X P X l = 72 X 13 X 17 cm, poids : env. 15 kg

Embouts intégrant une cuvette de rétention des particules et un clapet anti-retour.

Garantie 2 ans

Un seul calibrage tous les 12 à 14 mois

VERSIONS DISPONIBLES

CODE

Borne C KI KI CONDUIT comprenant 1000 Embouts hygiéniques & 100 Jetons	3601260
Embouts individuels hygiéniques (Lot de 1000)	6811615
Jetons C KI KI CONDUIT (Lot de 100) – 3 lots minimum à la commande	3600981
Embase comptoir blanche	3602430
Pied poubelle C KI KI CONDUIT	3601652
Embase pied poubelle C KI KI CONDUIT	3601623
Caisse mixte de transport P/Borne	3605343

Dräger Safety France s.a.s.

3c, route de la Fédération - BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 40 76 76
Fax. +33 (0)3 88 40 76 67

<http://www.draeger.com>

Département Industrie

Tél. +33 (0)3 88 40 76 76
Fax. +33 (0)3 88 40 98 06

safety.france@draeger.com